

Vejledning til patientregistrering i DD2

(Til brug i praksis som selv centrifugerer og afpipetterer prøver)

1. Find egnede patienter

- Inklusionskriterier søg evt. i eget lægesystem diagnosekode T90 på:
 - Patienter som er fyldt 18 år.
 - Patienter diagnosticeret med type 2 diabetes indenfor de sidste 2 år.
- Tjek om patienten allerede er tilmeldt DD2
 - Login via hjemmesiden dd2.dk med udleveret brugernavn og adgangskode (se velkomstbrev – adgangskode kan ændres under "Din profil").
 - Vælg fanen "Søg DD2-Patient" og derefter "CPR-opslag". (Tast hele CPR-nummeret inkl. bindestreg eller de første 6 cifre uden bindestreg).

| | | Projektmedarbejder |
|---------------------------|--------------|--------------------|
| Patientregistreringsskema | \mathbf{R} | |
| Patientinformation | CPR opslag | |
| Vejledninger | | |
| Søg DD2-Patient | | |
| Kontakter i DD2 | | |
| Din profil | | |
| | | |
| | | |



2. Informer patienten om deltagelse i DD2

- Giv mundtlig information om DD2 fx at:
 - Type 2 diabetes er en sygdom, som rammer flere og flere danskere og giver risiko for følgesygdomme. Ved deltagelse i DD2 bidrager patienten til forskningen og dermed muligheden for at tilpasse behandlingen af type 2 diabetes til den enkelte patient i fremtiden.
 - Det er valgfrit at deltage i DD2, og samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.
 - Patienten skal møde fastende til blodprøver. (Dvs. ingen mad og blodsukkerregulerende medicin fra kl 22.00 dagen før blodprøve, men der må gerne drikkes vand.)
- Udlever skriftligt resumé af deltagerinformationen og flyer til patienten. (Ved telefonisk kontakt til patienten for deltagelse i DD2, gives mundtlig information, og patienten opfordres til at læse deltagerinformationen, som findes sammen med det elektroniske samtykke i WebPatient).
- Aftal tid med patienten til DD2-blodprøvetagning fx sammen med en diabeteskontrol. Se afsnit 6 i den udleverede vejledning for dit område, hvilke dage det tilknyttede laboratorium har mulighed for at modtage DD2-blodprøver fra praksis.
- Udlever urinspidsglas og bed patienten om at medbringe en midtstråle morgenurinprøve til den aftalte tid for DD2-blodprøvetagning. (Alternativt spoturin lavet i klinikken).

3. Send invitation til patienten via WebPatient

| WebRea | Practices Nancy Tes | eq Test (123496), 002 | Sendte (11) Gemte (0) Hotel (0) | Tilbagesvar (0 af 0) | 🦰 Ønsker til WebRe |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|
| LABORATORIEREKVISITION | T ducint Hundy Tes | ser berggrent, zorzeo oboo (n) ro un | - Sendre (11) - Semire (8) - Hoter (8) - | nibagestal (o al o) | |
| boratorium | _ | Prøvetagningstid | | | |
| eb Patient | ~ | 4 juli 2019 14 | 01 O | | |
| nik profiler | | Laboratorie profiler | | Rekvisitionstype | |
| eig | | Vælg | v | Prøve indsendes | ~ |
| | | REKVISITION: LABOR | ATORIEMEDICIN | | |
| 🛿 Udfør 🔝 Skemavisning 📙 Gem 🛹 Hotel | 🖺 Nulstil 📗 Laboratoriesvarpo | ortalen | 💑 Glas 🦓 Pris | 🚺 Oplysninger 📎 Advis Reitereringer | V Interval (dage) |
| 0G: Angiv søgeord | | | | | |
| KLINISK BIOKEMI | | | | WEP | |
| KLINISK MIKROBIOLOGI | | | | | |
| PATOLOGI | | | | | |
| EGNE ANALYSER | | | | | |
| WER PATHENT | | | | | |
| WEB PATIENT | | | | | |
| ASS score;Pt(angst) | E 🗛 🌪 🔲 | | | | |
| Riodsukkerprofil | E 🗛 🗭 🗌 | | | | |
| CAT score;Pt | E 🗛 🛸 🗌 | | | | |
| CMDQ score;Pt | E 🗛 🗭 🗌 | | | | |
| DAN-PSS;Pt(urinvejssymptomer) | E 🗛 🗭 🗌 | | | | |
| DD2 | | | | | |
| Corressionsskema | E 🗛 🗭 🗌 | | | | |
| A Hjemmeblodtryk | E 🗛 🗣 🔲 | | | | |
| Hovedpinedagbog;Pt(voksen) | | | | | |
| KRAM;Pt | F 🗣 🗌 | | | | |
| 🖄 Kropsmål-skema | | | | | |
| | | | | | |

I WebReq vælges "WebPatient" og derefter profilen DD2



| | REKVISITIONSOPLYSNINGER | | |
|--|---|----|---|
| | INFORMATIONER / SPØRGSMÅL: | | |
| Neder | nstående spørgsmål markeret med 🤗 skal besvares | | |
| Nede | nstående spørgsmål markeret med 💛 kan besvares | | |
| | | | |
| Link i OPLYSNINGER, der åbner | patient-vejledning og skema til kladde-brug | h | Patientens mail er nåkrævet |
| Patientens mobilnummer (sms): | (talværdi) | Ļ | Overføres automatisk fra læge- |
| Patientens e-mail adresse: | mail@adresse.dk | J | systemet, hvis det findes heri. |
| Patienten accepterer yderligere information | Ja 🔻 | } | Skal være ja, hvis accept om info. |
| DD2 Skema udløb efter antal dage: | 20 (talværdi) | } | Antal dage udfyldes. Vælg fx 120- 200 dage, så patient har god tid til |
| Rekvisitionskommentar (320 af 320) tegn tilbage | <i>//</i> | - | at besvare inden næste tid. |
| Information til prøvetager (320 af | | | |
| 320) tegn tilbage | // | | |
| Information til patient (320 af 320) | | Ĵ | Besked til patienten i WebPatient |
| tegn tilbage Betaler: | Region T Region | Ł | Degion DD2 of regning via vialescent |
| Samtykke til videregivelse af svar er | Region Program | ſ | Region. DD2-arregning via ydeisesni. |
| givet | Nej 🔵 Ja 💿 | ⊦ | Standard "ja". Er ikke relevant ift. DD2 |
| Rekvirent initialer | mm | 1 | |
| | TILBAGESVAR | | |
| Overvågning af rekvisition | Nej 🔵 Ja 💿 | } | Overvågning mulig i WebReq |
| Overvågning ved manglede svar til patient | Nej 💿 Ja 🔾 | } | Ikke relevant for DD2 |
| Max antal dage inden svar til patient (efter komplet svar modtaget) | 5 | } | Ikke relevant for DD2 |
| Aftale med patient: | Mundligt aftalt mellem læge/klinikken og pt, at pt kun kontaktes ved "afvigelser" • |]} | Ikke relevant for DD2 |
| 🕼 Annuller | ▲ <u>0</u> K | | |

■ I pop-up vinduet udfyldes felterne, som er markeret – se herunder.

- Afslut pop-up vinduet med "OK" og vælg "udfør".
- Patienten modtager mail med link til <u>www.web-patient.dk</u>, hvor samtykkeerklæring, deltagerinformation og registreringsskema vises.
- Vinduet med prøvetagningsblanket (PTB) skal lukkes.
- > Kan patienten ikke modtage link via WebPatient, er det muligt at printe samtykkeerklæring og registreringskema via hjemmesiden dd2.dk - kræver login.
 - Papirerne udfyldes sammen med patienten og sendes pr. post til DD2, Kløvervænget 6,
 8. sal, 5000 Odense C.
 - Husk at samtykkeerklæring skal underskrives af både patienten og personen, som foretager DD2-undersøgelsen.



4. Inden patienten kommer til blodprøvetagning

- Patienten logger ind via tilsendt link i WebPatient og afgiver elektronisk samtykke med NemID, og får adgang til registreringsskemaet.
- Patienten besvarer spørgsmål og sender registreringsskema ved at trykke "Send til læge".

5. Registreringsskema gøres færdig i praksis

Via WebReq findes patientens besvarelser i registreringsskemaet frem under WebPatient Arkiv

| Mah | Praksis | 2 | • De sidste 4 uger = Alle gente = WebPatient Arkiv = Udestående klinik |
|--------------------------|---------|----------|--|
| vebreg | Patient | | Sendte (12) Gemte (0) Hotel (1) Udestående patient (1 af 2) |
| LABORATORIEREKVISITION " | | | |

- Skema skal have status "Afsendt" for, at det kan færdiggøres i praksis.
- Klik på "DD2" under "Skemanavn". Skemaet kan kun åbnes ved at klikke direkte på "DD2". Herefter vises patientens besvarelser.

| Web-Patient | | | | | | Velkommen WebReq | Test, DD2 Log af |
|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | | |
| - WebReq Test's Skemaer | | | | | | | - 1 |
| Cpr-nummer Søg | | | | | | | - 1 |
| Patient | Skemanavn | Oprettet d. | Oprettet af | Gyldighedsperiode | Senest ændret | Status | |
| Nancy Tester Berggren (251248-0000) | DD2 | 06-06-2019 | WebReq Test | 06-06-2019 - 26-06-2019 | 07-06-2019 08:18:32 | Afsendt | |
| Nancy Tester Berggren (25124 | DD2 | 04-06-2019 | WebReq Test | 04-06-2019 - 24-06-2019 | 11-06-2019 13:50:38 | Aktiv | |
| Nancy Tester Berggren (25124 | DD2 | 04-06-2019 | WebReq Test | 04-06-2019 - 24-06-2019 | | Aktiv | |
| | | | | | | | |

- Tjek først, om alle patientspørgsmålene er udfyldt. Gennemgå dem, hvis der har været tvivl om besvarelsen.
- Færdiggør registreringsskemaet mht. hofte-/taljemål, hvilepuls, vægt, diagnosetidspunkt osv. og tryk "Send til DD2".



6. Blodprøvetagning og WebReq

- Udskriv prøvetagningsblanketten fra WebReq
 - Første gang DD2's prøvetagningsblanket (PTB) skal hentes, vælges "Vejle Sygehus" under laboratorium.
 - Under laboratorieprofiler (alle) vælges "DD2-blod" og stjernen markeres gul.
 - Prøvetagningsblanket ligger fremover øverst i "Laboratorieprofiler (alle)" i din egen WebReg-opsætning.

| | Praksis 🦻 Læg Patient Nancy 1 | gehuset WebReq (123456), DD2 Tester Berggren , 251248-9990 (n) 71 år | De sidste 4 uger = Alle gemte = WebPatie Sendte (24) = Gemte (0) = Hotel (0) = Till | nt Arkiv bagesvar (2 af 3) | = Ønsker til WebReq |
|---|----------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|
| Laboratorium Hent nyheder fra laboratoriet Vejle Sygehus (henteordning) | 2 | Prøvetagningstid 13 marts 2020 | ÷ | | |
| Vælg | | Laboratorie profiler Vælg | ▼ ▼ | Rekvisitionstype Preve indsendes | V |
| | | REKVISITION: LABORATORI | EMEDIGIN | | |
| 📫 Næste 💟 Udfør 🔝 Skomavisning 📙 Gem 🛹 I | lgtel ి Nulstil 🗐 | Laboratoriesvarportalen | 💑 Glas 🗾 Oply | rsninger 📎 A <u>d</u> vis Reitereringer 💽 | Interval (dage) |
| søg: | | 🗇 KLINIK PROFILER | | LABORATORIE PROFILE | R (ALLE) 🛪 |
| - KLINISK BIOKEMI | | Laboratoriemedicin | hyp.art årskontrol | DD2 - blod | 0 対 |
| | | | | | |
| 😕 Hærnoglobin;B | 🔜 🖗 🛄 | C @BLOK+PROMPT | Fertilitetsudred (M) med lang lang tekst | | 1 |
| Hæmoglobin;B Erytrocytter;B | ≉ A | hepatitisprofil | Fertilitetsudred (M) med lang lang tekst Partner donor | Cobalamin | 14 12 |
| ★ Hærnoglobin;B ★ Erytrocytter;B ★ Folat;P | | BLOK+HKOMP1 bepatitisprofil Lidt af hvert | Fertilitetsudred (M) med lang lang tekst Partner donor Demens | Cobalamin Diabetes, årskontrol | 2 2 2 |
| | ₩ ♥ □ ₩ ♥ □ | GBLOK+HROMP1 hepatitisprofil Lidt af hvert nytsort | Fortilitetsudred (M) med tang lang tekst Partner donor Demens Væsketal | Cobalamin Diabetes, årskontrol Diabetes,hver 3. mdr | 2 2 2 2 |
| | | Gigl.Cit.+PrCMP1 hepathisprofil Lidt af hvert ry/sort MRSA screening | Fertilitetsudred (M) med lang lang tekst Partner donor Demens Vasiketal Fertilitetsudred (K) | Cobalamin Diabetes, årskontrol Diabetes, twer 3. mdr Digoxin | |
| * Hamoglobin,B * Erythooster,B * Folder,P VELG, ANDGE, ANALYSER, + KLINESK, MIKROBIOLOGI + PATOLOGI | | GOLUKEPROWE Goluine Goluine | Fertilitetsudred (M) med lang lang tekst Partner donor Demens Veskotal Fertilitetsudred (K) test af laboratorium hjerring | Cobalamin Diabetes, årskontrol Diabetes, hver 3. mdr Diabetes, hver 3. mdr Diabetes, hver 3. mdr | |
| Harmopickin B Eprioropice B Folder,P VALES, ANR.BR: ANALYSER KLIMISK MIRKORIGLOGI PATOLOGI EGNE ANALYSER | | BitLOK+TACMAP1 bepatisjon Lidt af hvert rytsort MRSA screening Med sensets svar ØNH Dyrkning og resistens | Pertititesudred (M) med lang lang tekst Partner donor Demens Væskotal Fertititesudred (K) test af laboratorium hjerring ny | Cobalamin Diabetes, årskontrol Diabetes, hver 3. mdr Digoxin Drigoxin Erriks test | |

- > Tag Blodprøver (DD2-prøverør/materiale må ikke erstattes af andet)
 - Tjek udløbsdato på blodprøverør.
 - Sæt PTB-labels med barkoder på rør efter farve.
 - Blodprøverne tages i denne rækkefølge:



- Vend rørene 10 gange efter blodprøvetagningen, dog skal lyserøde rør vendes forsigtigt 15 gange.
- Stil blodprøverne ved stuetemperatur i minimum ½ time før centrifugering dog højst 2 timer ved stuetemperatur eller 6 timer i klimaskab inden centrifugering.



7. Centrifugering og afpipettering

- Centrifuger:
 - Centrifuger **ikke** urinspidsglas og de to 4 ml lilla EDTA-glas.
 - Centrifuger resten af primærrørene ved stuetemperatur i 10 minutter ved 1.500-2.000 g (centrifugalkraft).
- > Afpipettering:
 - Afpipetter prøverne direkte fra primærrør over i kryorør efter centrifugering. De må maksimalt stå en time, fra de er centrifugeret til de afpipetteres.
 - Vær opmærksom på, at der ved afpipettering ikke må komme blodlegemer med.
 Sug ikke for kraftigt. Sker det alligevel centrifuger da prøven igen og afpipetter på ny.
 - Brug en **ny pipette** til hver type rør.
 - Der er ikke en bestemt rækkefølge for afpipetteringen, blot skal hver type rør afpipetteres for sig.
- > Håndtering af primærrør/kryorør efter afpipettering:
 - Sæt medsendt label mærket "Projekt_ID 00" på prøvetagningsblanketten (PTB).
 - **4 ml Lilla** EDTA-glas skal ikke afpipetteres: Sæt de to medsendte labels mærket "EDTA fuldblod 17 til 18" på rørene. Disse labels skal dække PTB-labelen.



Kryorør leveret sammen med DD2-prøverør (primærrør)



| Fra 10 ml tørglas til kryorør med brune | Fordel serum i de fire kryorør mærket med |
|--|--|
| streger | barkode "Serum 01 til 04" og sæt brune låg |
| | på (bortskaf primærrør). |
| | |
| Fra 10 ml Li-Hep plasmaglas til kryorør med | Fordel plasma i de fire kryorør mærket med |
| grønne streger | barkode "Li-Hep 05 til 08" og sæt grønne låg på (bortskaf primærrør). |
| | |
| | |
| Fra 3 ml FC plasmaglas til kryorør med | Fordel plasma i de to kryorør mærket med |
| lyserøde streger | barkode "FC 09 til 10" og sæt lyserøde låg på |
| | (bortskaf primærrør). |
| | |
| | |
| Fra 10 ml EDTA-glas til kryorør med lilla | Fordel EDTA-plasma i de fire kryorør mærket |
| streger | med barkode "EDTA 11 til 14" og sæt lilla låg |
| | på. |
| | OBS: Barkode "15 til 16" er udgået |
| | obs. barkoue 15 th 16 er dugaet. |
| | |
| 4 ml lilla EDTA-glas skal ikke afpippetteres | Sæt de to medsendte labels mærket "EDTA |
| | skal dække hele PTB-labelen. |
| | |
| Era 2.7 ml sitratglas til kryorør mod blå | Fordol citratolasma i da ta kovardr markat |
| streger | med barkode "Citrat 23 til 24" og sæt blå låg |
| | på (bortskaf primærrør). |
| | |
| | |
| Fra spidsglas med urin til kryorør med gule | Vend og fordel urin fra spidsglas i fire kryorør |
| streger | mærket med barkode "Urin 19 til 22" og sæt |
| | gule låg på (bortskaf primærurinspidsglas). |
| | |
| | |
| | |



- Blodprøverne indsendes:
 - MANDAG, TIRSDAG, ONSDAG eller TORSDAG
 - HUSK: Ingen patienter fredage, før helligdage og før grundlovsdag.
 - Placer alle rør i tilsendte Sealbag sammen med sugeindlægget. Luk Sealbag'en og placer den i vedlagte papbeskyttelse. Brug en Sealbag pr. patient.



 VIGTIGT: De indpakkede urin- og blodprøver pakkes i udleveret kuvert til Biobanken sammen med udfyldt original prøvetagningsblanket (PTB) påklistret label "projekt ID 00".



- Alle prøver sendes samme dag som Quickbrev til: Laboratoriecentret, Klinisk Biokemi – L140, Vejle Sygehus, 7100 Vejle, Att.: DD2-projektet.
 - Det er **vigtigt**, at prøverne **sendes som Quickbrev**, så de når frem til biobanken dagen efter.
 - Quickbreve skal frankeres med 2 frankeringsmærker, som fx kan købes på posthuset. Quickbreve skal afleveres på posthuset.

8. Honorering

 Afregn med ydelseskode i eget lægesystem - jvf. den udleverede vejledning for dit område.



Ved spørgsmål – kontakt:

Biobanken omkring blod- og urinprøver: ⊠ kiba.projekter@rsyd.dk / Ĵ 79 40 65 21 el. 29 25 86 74

Praktisk information omkring registrering i DD2: Marianne Nielsen, DD2-konsulent, Farmakonom Marianne.nielsen8@rsyd.dk /) 24 41 69 18

DD2-centret: ⊠ ouh.dd2@rsyd.dk / ℑ 65 41 36 25



Bilag 1: DD2-registrerings skema i WebPatient

| DD2 S | kema | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| NFORMATION OM DD2 – DANSK CENTER FOR STRATEGISK FORSKNING I TYPE 2 DIAB | BETES | | | | | |
| Det er frivilligt at deltage. Du kan til enhver tid framelde dig DD2. Det påvirker ikke d Hvem kan være med? Alle nydlagnostiserede (indenfor de sidste 2 år) diabetikere ov Spargsmål til deltagelse i DD2? Kontakt DD2 på ouh.dd2@rsyd.dk eller telefon 65 41 Spargsmål til skemaet gennemgås ved din næste tid hos din læge. | n diabetesbehandling, hvis du framelder dig. er 18 år med type 2 diabetes. 36 25. | | | | | |
| Se deltagerinformation Se video | | | | | | |
| SAMTYKKEERKLÆRING | | | | | | |
| DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark sag nr. 20 J Jeg bekræfter hermed, med mit samtykke, at have modtaget DD2-projektets o deltage i det beskrevne projekt. "DD2 - Dansk center for strategisk forskning i j mår som helt on uden grund kar trækken mit libase und | 00 082. eltagerinformation, såvel skriftligt som mundtligt, samt at jeg ensker at ype 2 diabetes". Jeg er informeret om, at det er frivilligt at deltage og at jeg m å der vil nåvikke den nuværende eller fermvillige handling af me Dette | | | | | |
| gælder også, selv om jeg har givet mit skriftlige samtykke på, at jeg vil deltage Jeg er indforstået med, at blod- og urinprøverne tages med henblik på opbev anvendes til forskning i arveligheden bag type 2 diabetes og de følgesygdomn former for behandling og forebyggelse. Videre kan jeg på ethvert tidspunkt be fra DD2-projektet. | ring i en forskningsbiobank, samt at prøverne, når der er givet tilladelse, kan ie, der knytter sig hertil med henblik på sygdomsforstålelse og udvikling af nye de om at få mine data, blod- og urinprøver destrueret samt fjernet mine data | | | | | |
| Bekræft godkendelse | 🖨 Udskriv Samtykke PDF | | | | | |
| HØJDE | | | | | | |
| løjde | cm (helt tal) | | | | | |
| ÆGT | | | | | | |
| /ægt som 20 årig | kg (helt tal) Ved ikke | | | | | |
| løjeste Vægt nkluderer ikke vægt under en eventuel graviditet | kg (helt tal) Ved ikke | | | | | |
| ILKOHOLINDTAGELSE | | | | | | |
| Antal genstande om ugen Angiver dit sædvanlige forbrug i en normal uge | 14/21 genstande/uge eller derunder (kvinde/mand) | | | | | |
| ngiver dit sædvannige forbrug i en normal uge | Over 14/21 senstande/use (kvinde/mand) | | | | | |
| SYSISK AKTIVITET OG MOTION | | | | | | |
| ntal dage om ugen, hvor du er fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. | | | | | | |
| ier medregnes moderat eller hård fysisk aktivitet, hvor vejrtrækningne stiger, nusklerne bliver rørt, og der bliver brugt kræfter - f.eks. motions- eller | lingen dage 4 dage | | | | | |
| :onkurrenceidæt, tungt havearbejde, rask gang, cykling i moderat eller hurtigt empo eller fysisk anstrengende arbejde. | | | | | | |
| /ledregn både arbejde og fritid. | 3 dane 7 dane | | | | | |
| Dyrker du idræt i fritiden, eller deltager du regelmæssigt i andre aktiviteter, der giver | S dage | | | | | |
| notion? | 🔾 Ja 💫 Nej | | | | | |
| ^s ysisk aktivitet i fritiden det seneste år | Markér ved den beskrivelse, der passer bedst | | | | | |
| | Træner hårdt og dyrker konkurrenceidræt regelmæssigt og flere gange om ugen | | | | | |
| | Dvrker motionsidræt eller udfører tungt havearbeide eller lignende mindst 4 timer | | | | | |
| | om ugen O Spadserer, cykler eller har anden lettere motion mindst 4 timer om ugen (medregn | | | | | |
| | også søndagsture, lettere havearbejde og cykling/gang til arbejde) | | | | | |
| | Læser, ser fjernsyn eller har anden stillesiddende beskæftigelse | | | | | |
| FAMILIEMEDLEMMER MED KENDT TYPE 2 DIABETES Er der personer med kendt type 2 diabetes i din nærmeste familie? | a la Nei Vedikke | | | | | |
| UDFYLDES I PRAKSIS | | | | | | |
| Den dato, hvor DD2-undersøgelsen finder sted | 25-01-2019 | | | | | |
| Tages der blodprøve i forbindelse med udfyldelse af dette skema | | | | | | |
| | ○ Ja ○ Nej | | | | | |
| | | | | | | |
| Diabetes debutår: Kun debut indenfor de sidste to år | Måned/År 🛛 Ved ikke | | | | | |
| /ÆGT | | | | | | |
| Vægt | kg (heit tai) | | | | | |
| HOFTE-TALJE RATIO (HTR) | | | | | | |
| Hofte- og taljeomkreds, målt direkte på huden | Hofteomkreds : cm (helt tal) | | | | | |
| | Taljeomkreds: cm (helt tal) | | | | | |
| PULS | | | | | | |
| ivilepuls | hjerteslag per minut | | | | | |
| | · · · · · | | | | | |

Kort information om DD2 Deltagerinformation og video om DD2

Udfyldelse af samtykke

Spørgsmål der besvares af patient

Spørgsmål der besvares i praksis

DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes

Kløvervænget 6, 8. sal | 5000 Odense C | Tlf. +45 6541 3625 | ouh.dd2@rsyd.dk | www.dd2.dk



Bestilling og print af materiale

1. Bestilling af prøvetagningsrør

- Login via hjemmesiden dd2.dk med udleveret brugernavn og adgangskode
- Vælg fanen "Vejledninger"
- Vælg "Bestil prøvesæt online".

| | | | | Projektmedarbejder |
|---------------------------|--|---------------------------|-----------------|------------------------|
| Patientregistreringsskema | | Burry | | D |
| Patientinformation | Generisk vejledning i patientregistrering - | DD2 buffy coat vejledning | Buffy Coat film | Bestil prøvesæt online |
| Vejledninger | model 1 | | | |
| Søg DD2-Patient | Generisk registrering og | | | |
| Kontakter i DD2 | blodprøvevejledning - transportordning | | | |
| Din profil | | | | |

Bestillingsvindue vises

| Bestil prøvesæt online | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| En bestilling af prøvesæt afsendes altid den efterføglende hverdag med PostNord. Vær opmærksom på at der er begrænset holdbarhed på prøvesættene. Bestil derfor kun det antal som du forventer at skulle bruge. | | | | | | |
| Bestillingsseddel - DD2-prøvesæt | | | | | | |
| Vælg ønsket prøvetagningssæt | | | | | | |
| Vælg type | v | | | | | |
| Vælg ønsket antal prøvetagningssæt | | | | | | |
| 2 stk. | | | | | | |
| 5 stk. | | | | | | |
| 0 10 stk. | | | | | | |
| 0 25 stk. | | | | | | |
| Bestilles af | | | | | | |
| Navn: | ITTPL | | | | | |
| TIÉ | | | | | | |
| Adresse: | ITTPL Vej 3434 ITTPL By Att. Jens Steen Nielsen | | | | | |
| | | | | | | |
| Send bestilling | | | | | | |

- Under "Vælg type" vælges "komplet prøvesæt til dig der tager blodprøver og centrifugerer selv".
- Vælg antal prøvetagningssæt
- Tryk på "Send bestilling"



2. Bestilling af patientflyers

For bestilling af patientflyers: Send e-mail til ouh.dd2.dk

3. Print af informationsmateriale

> Mulighed for at printe deltagerinformation:

- Find fanen "Patientinformation"
- Vælg "Resumé af deltagerinformation på dansk" eller deltagerinformation på andre sprog

| | | | | Projektmedarbejder |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Patientregistreringsskema | | | | |
| Patientinformation | Samtykkeerklæring - dansk | Deltagerinfomation - dansk | Resume af deltagerinformation - | Før dr, beslutter dig |
| Vejledninger | | 1 | dansk | |
| Søg DD2-Patient | Samtykkeerklæring - | Deltagerinformation - | Patientflyer | Spørgeskema om |
| Kontakter i DD2 | arabisk | arabisk | | livskvalitet PDF |
| Din profil | | | | |

> Mulighed for at printe samtykkeerklæring:

- Find fanen "Patientinformation"
- Vælg samtykkeerklæring på dansk eller andre sprog.





- > Mulighed for at printe patientregistreringsskema
 - Find fanen "Patientregistreringsskema"
 - Vælg "Patientregistreringsskema praksis PDF".



4. Samlet visning af tilmeldte DD2-patienter i din praksis

- Find fanen "Patientregistreringsskema"
- Vælg "Alle dine patienter"

| | | | | Projektmedarbejder |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| Patientregistreringsskema | | | <u>38</u> | |
| Patientinformation | Registreringsskema PDF | Registreringsskema online | Alle dine patienter | |
| Vejledninger | | | | |
| Søg DD2-Patient | | | | |
| Kontakter i DD2 | | | | |
| Din profil | | | | |
| | | | | |

Liste over tilmeldte patienter vises:

| Alle dine patienter | | | | | |
|--|----------------------|------------|------------------------|-------------|--------------------|
| IDA status forklaring: Grøn = undersøgelsen er gennemført, Rød = undersøgelsen mangler | | | | | |
| ¢CPR | ♦ Navn | ♦DD2 dato | ♦IDA dato | ♦IDA status | ◆ Kommentar |
| | (Afdød) Otto Sletten | | Afdød | - | |
| | Peder Pedersen | 16-02-2015 | Ønsker ikke at deltage | - | |
| Gem som Excel fil | | | | | |

DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Kløvervænget 6, 8. sal | 5000 Odense C | Tlf. +45 6541 3625 | ouh.dd2@rsyd.dk | www.dd2.dk



5. Ved spørgsmål – kontakt:

Biobanken omkring blod- og urinprøver: ⊠ kiba.projekter@rsyd.dk / Ĵ 79 40 65 21 el. 29 25 86 74

Praktisk information om at deltage i DD2: Marianne Nielsen, DD2-konsulent, Farmakonom ⊠ marianne.nielsen8@rsyd.dk /) 24 41 69 18

DD2-centret: ⊠ ouh.dd2@rsyd.dk / ℑ 65 41 36 25